


CANETA PARA INJEÇÃO DE INSULINA GLOBALX U MODELO HFZSQ-II

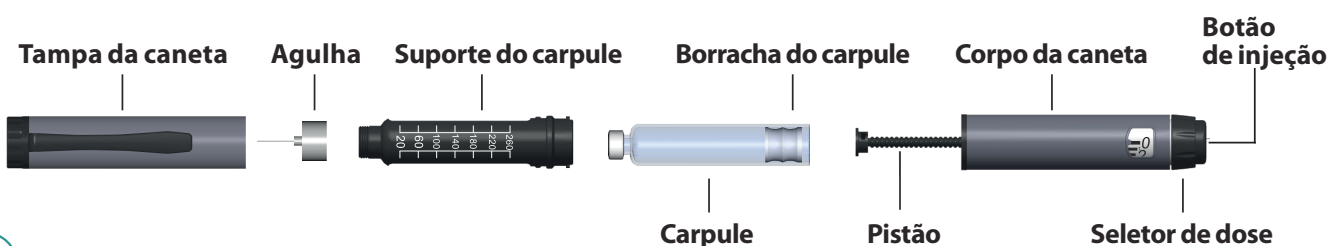


PREPARAÇÃO:

Higienize as mãos lavando com água e sabão ou com álcool 70 e prepare os seguintes itens antes da injeção:


- Caneta de injeção de insulina GlobalX U
- Nova agulha
- Carpule de insulina
- Algodão embebido em álcool

INSTALAÇÃO DE CARPULE E AGULHA:


Passo 01: Retire a tampa da caneta

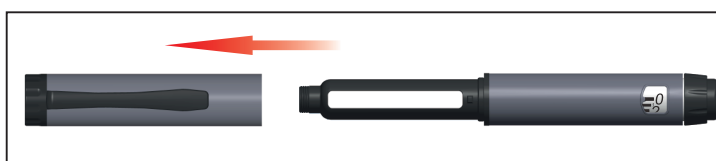

Passo 2: Remova o suporte do carpule do corpo da caneta. Com uma mão segure o corpo da caneta, e com a outra mão segure o suporte do carpule. Delicadamente, rotacione as duas partes em sentidos contrários. Você ouvirá o "click", indicando a separação do suporte do carpule e o corpo da caneta.

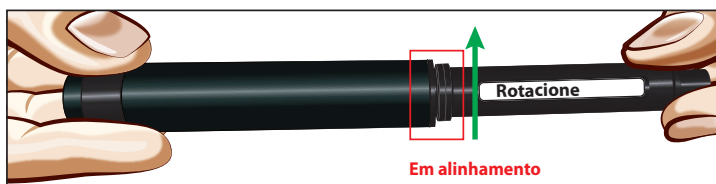

Passo 03: Verifique se o pistão está para fora e empurre delicadamente com o dedo até o pistão travar dentro do corpo da caneta

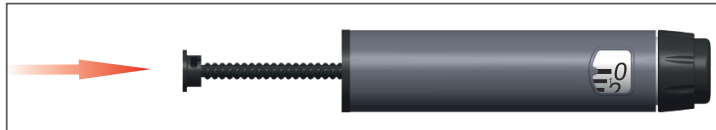

Passo 04: Insira o carpule com a tampa de metal voltada para frente



Passo 5: Encaixe o suporte do carpule no corpo da caneta. Com uma mão segure o corpo da caneta, e com a outra mão segure o suporte do carpule. Alinhe o corpo da caneta com o suporte do carpule em um encaixe delicado entre as partes.



Delicadamente, exercendo leve pressão, rotacione as partes em sentidos contrários. Você ouvirá um "click", indicando que o encaixe completo foi concluído. Após o "click", delicadamente puxe as extremidades da caneta para garantir que o encaixe foi bem-sucedido.




ATENÇÃO: CASO ESTEJA UTILIZANDO INSULINA NPH, ORIENTAR A HOMOGENEIZAÇÃO DA SUSPENSÃO.


Passo 06: Retire o lacre da agulha



Passo 07: Encaixe a proteção externa da agulha na ponta da caneta e gire o corpo da caneta no sentido horário até sentir que a agulha travou.

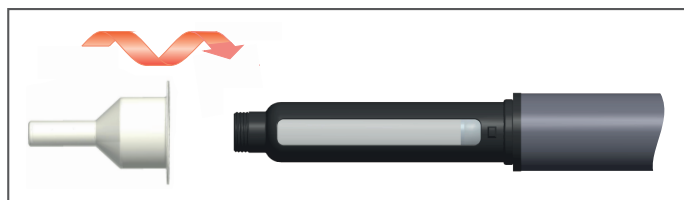


Passo 08: Retire a proteção externa da agulha e guarde. Retire a proteção interna da agulha e descarte.

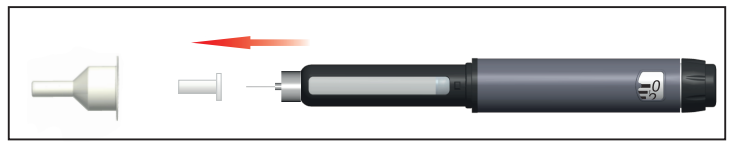


PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:


Passo 01: Gire o seletor de dose no sentido horário até 2 UI (2 cliques)

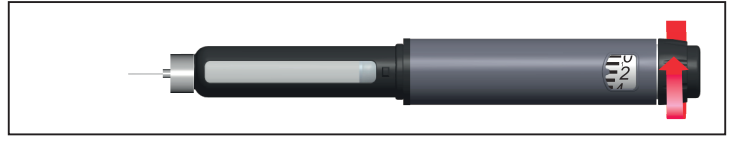

Passo 02: Segure a caneta com a agulha apontando para cima. Bata suavemente no carpule várias vezes com o dedo para que as bolhas de ar subam para a parte superior do carpule facilitando a remoção.

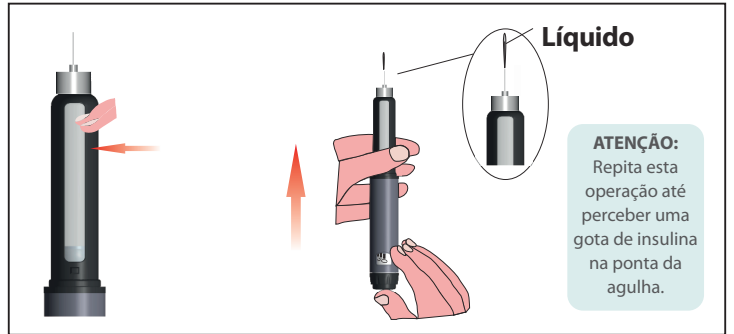


Passo 03: Use o botão seletor de doses para selecionar a dose prescrita, girando o botão seletor no sentido horário para aumentar o número de unidades a ser aplicada ou volte no sentido anti-horário para diminuir.

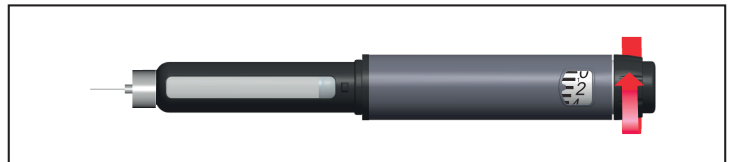


Passo 04: Use o botão seletor de doses para selecionar a dose prescrita, girando o botão seletor no sentido horário para aumentar o número de unidades a ser aplicada ou volte no sentido anti-horário para diminuir.



Passo 05: Retire a agulha da caneta utilizando a proteção externa

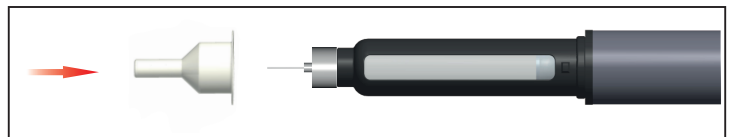

Passo 06: Tampe a caneta e guarde conforme orientado.

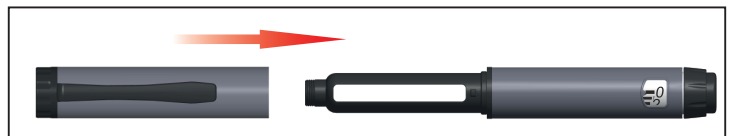

Em caso de dúvidas, sugestões ou elogios, fale com a gente.



Digitalize o QRcode para acessar nossos principais materiais de apoio



CONTE SEMPRE CONOSCO!

☎ 0800 591 0658

✉ sac@globalxtechnology.com

<https://www.globalxtechnology.com.br/>